
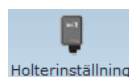


## Kortbruksanvisning

### Förberedelser för att starta en blodtrycksregistrering i Darwin

Starta **medilog**DARWIN mjukvaran genom att dubbelklicka på den här ikonen,  och koppla anslutningskabeln från blodtrycksdosan till datorn.

När **medilog**DARWIN har startat, välj **Holterinställning**



i övre panelen, ange patientinformation

och klicka på BR-102plus ikonen.

- Fyll i starttid samt intervall.


-Manuella mätningar: Här har du möjlighet att skriva in mätningar gjorda manuellt innan registreringen startats.

- Manuell start: Patienten startar själv. (rekommenderas ej).

-24 timmars registrering: Här väljer du mellan 24 eller 48 tim registreringstid.

Klicka på den gröna pilen för att föra över patientdatan till dosan.

### Ladda in och lagra registreringen.

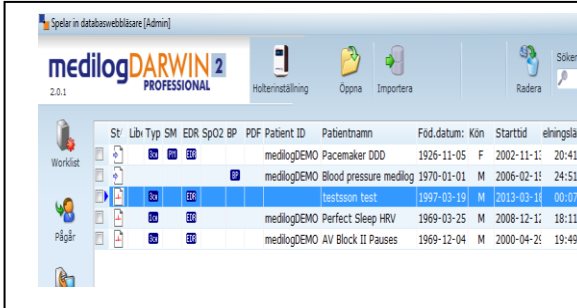
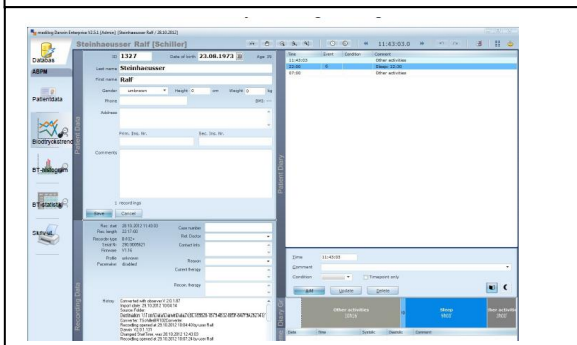
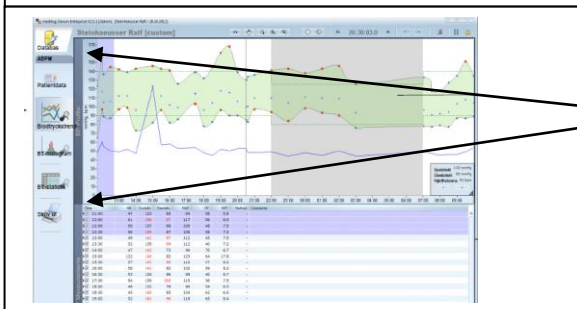
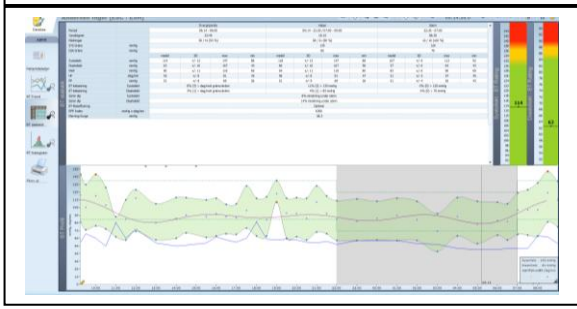
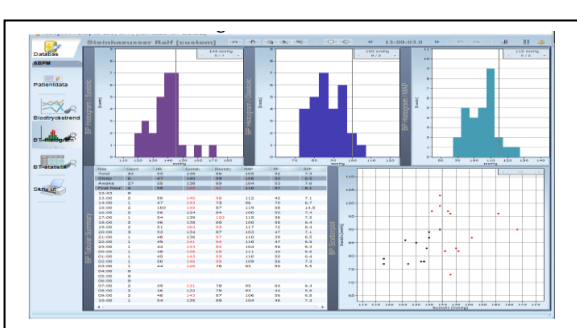
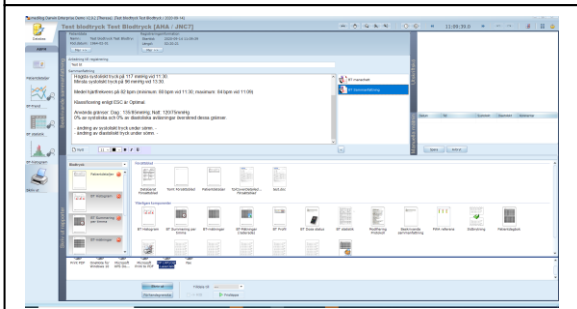
När registreringen är klar ansluter du kabeln till datorn. Nu laddas registreringen ner automatiskt. Om det inte fungerar automatiskt så säkerställ att observer  är aktiv dvs ligger aktiv i aktivitetsfältet eller gå in i Darwin och klicka på sök registrerare.

Nu laddas registreringen ner i datorn och finns sedan i databasen. Nu kan du gå igenom registreringen genom att dubbelklicka på aktuell patient .



För mer information-kontakta oss gärna! tel 031-521140, mail:info@coremed.se

Editera registrering

 <table border="1"> <thead> <tr> <th>St</th> <th>Lib</th> <th>Typ</th> <th>SM</th> <th>EDR</th> <th>SpO2</th> <th>BP</th> <th>PDF</th> <th>Patient ID</th> <th>Patientnamn</th> <th>Föd.datum:</th> <th>Kön</th> <th>Starttid</th> <th>slutningslä</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>medilogDEMO</td> <td>Pacemaker DDD</td> <td>1926-11-05</td> <td>F</td> <td>2002-11-11</td> <td>20:41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>medilogDEMO</td> <td>Blood pressure medlog</td> <td>1970-01-01</td> <td>M</td> <td>2006-02-11</td> <td>24:51</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>testsson</td> <td>test</td> <td>1997-03-19</td> <td>M</td> <td>2013-03-11</td> <td>00:07</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>medilogDEMO</td> <td>Perfect Sleep HRV</td> <td>1969-03-25</td> <td>M</td> <td>2008-12-11</td> <td>18:11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>medilogDEMO</td> <td>AV Block II Pauses</td> <td>1969-12-04</td> <td>M</td> <td>2000-04-21</td> <td>19:49</td> </tr> </tbody> </table>	St	Lib	Typ	SM	EDR	SpO2	BP	PDF	Patient ID	Patientnamn	Föd.datum:	Kön	Starttid	slutningslä									medilogDEMO	Pacemaker DDD	1926-11-05	F	2002-11-11	20:41									medilogDEMO	Blood pressure medlog	1970-01-01	M	2006-02-11	24:51									testsson	test	1997-03-19	M	2013-03-11	00:07									medilogDEMO	Perfect Sleep HRV	1969-03-25	M	2008-12-11	18:11									medilogDEMO	AV Block II Pauses	1969-12-04	M	2000-04-21	19:49	<p>Starta <b>medilogDARWIN</b> mjukvaran. Du kommer först att se databasen med alla patientinspelningarna. För att öppna en patientinspelning, så att du kan starta redigeringsprocessen, dubbelklicka på patientnamnet. <i>Pågår</i> (de som är påkopplade men inte nedladdade), <i>uppladdad</i> och <i>slutförd</i> (färdigredigerad) eller alla.</p>
St	Lib	Typ	SM	EDR	SpO2	BP	PDF	Patient ID	Patientnamn	Föd.datum:	Kön	Starttid	slutningslä																																																																								
								medilogDEMO	Pacemaker DDD	1926-11-05	F	2002-11-11	20:41																																																																								
								medilogDEMO	Blood pressure medlog	1970-01-01	M	2006-02-11	24:51																																																																								
								testsson	test	1997-03-19	M	2013-03-11	00:07																																																																								
								medilogDEMO	Perfect Sleep HRV	1969-03-25	M	2008-12-11	18:11																																																																								
								medilogDEMO	AV Block II Pauses	1969-12-04	M	2000-04-21	19:49																																																																								
	<p><b>Patientdata</b> Första fliken i arbetsflödet är Patientdata. Korrigera gärna när patienten gick och la sig samt steg upp för att få ett korrekt resultat.</p>																																																																																				
	<p><b>Blodtryckstrend</b> Här presenteras blodtrycksmätningarna och mätmetod. Du kan också klicka ur mätningar som du anser vara felaktiga så att de inte kommer med i utvärderingen. Önskade inställningar kan göras om du klickar på verktygsfältet.</p>																																																																																				
	<p><b>Blodtrycksstatistik</b> Här presenterar blodtrycksmätningarna fördelade på övergripande/vaken/sömn. En trendvy visas nedanför.</p>																																																																																				
	<p><b>Blodtryckshistogram</b> Här presenteras blodtrycksvärdena med hjälp av ett histogram.</p>																																																																																				
	<p><b>Skriv ut</b> Om du önskar en sammanfattning av registreringen klickar du på sammanfattning. Önskar du skriva ut rapporten så klicka på önskad rapport och välj skriv ut/förhandsgranska eller frisläpp. Frisläpp betyder att man markerar att den är granskad och klar och då skapas en pdf.</p>																																																																																				