

EASY PULSE®

Effektiv och kompakt mekanisk HLR
tack vare teknisk innovation


Senaste
generationen
automatisk HLR



SCHILLER
The Art of Diagnostics

EASY PULSE®

SCHILLER har tagit nästa steg för att förbättra kvaliteten på HLR med lanseringen av det otroligt lilla och lätta mekaniska bröstkompressionssystemet EASY PULSE.

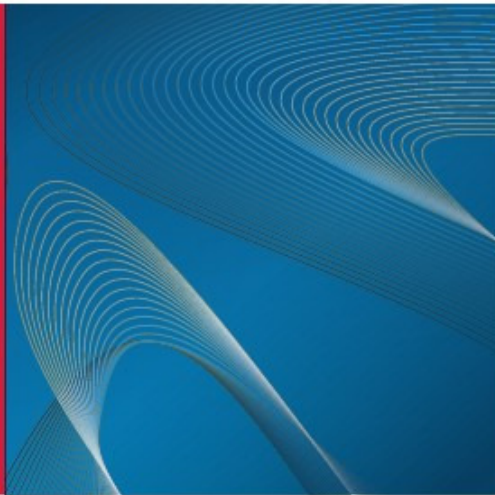

Att utföra bra manuella bröstkompressioner under en längre tid är nästan omöjligt. Det är inte bara fysiskt krävande, utan andra åtgärder krävs samtidigt, såsom övervakning av vitala tecken.

SENASTE GENERATIONEN AV AUTOMATISKA HLR APPARATER

EASY PULSE har en unik kombination av pistong och spännband som möjliggör 3D kompression och därför maximal effektivitet.



RYGGPLATTAN

Reglaget möjliggör en lätt förberedelse av patienten för mekaniska bröstkompressioner. Snabbt och enkelt fäster man apparaten tack vare det praktiska spärrsystemet - mindre än 15 sekunder för utbildad personal.

SCHILLERs EASY PULSE är lösningen för effektivare livräddning. Den här bärbara stand-alone apparaten ger jämna och kontinuerliga bröstkompressioner automatiskt. Den är direkt fäst på patientens överkropp och kan användas i alla situationer, oberoende av omgivande förhållanden. Speciellt under transport, kan en oavbruten bröstkompression av hög kvalitet garanteras.

Apparatens vikt sprids över hela basplattan och inte på en punkt och har därför ingen påverkan på bröstkompressioner eller på rekylen.

EASY PULSE är en enkel apparat, en ensam person kan använda den. Liten storlek och vikt är en stor fördel: EASY PULSE väger 3.5 kg, öppnar upp helt nya möjligheter t. ex. för livräddningstjänster med flyg eller helikopter.



LADDARE

Det uppladdningsbara batteriet kan laddas i en dubbel laddare (mindre än 2 timmar) eller i ett turboläge (mindre än 50 minuter) och räcker i ca 45 minuter.



ENKEL ANVÄNDNING

I en nödsituation måste allt vara rätt. EASYPULSE är enkel och intuitiv att använda: Att trycka på två knappar är tillräckligt för att omedelbart påbörja livräddning.



EXTERN STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DIREKT ANSLUTNINGSKABEL

En strömförsörjningsenhet för 100VAC till 240VAC volt ingång medföljer. EASY PULSE kan användas direkt med en strömkälla 12VDC - 24VDC via en speciell anslutningskabel.

TEKNISKA INNOVATIONER

Lätt vikt

- ❖ Otroligt liten och lätt elektriskt driven HLR apparat, väger 3.5 kg
- ❖ Idealisk för begränsade utrymmen

Egenskaper

- ❖ Multidirektionella bröstkompressioner (3D)
- ❖ Bröstkompressioner med konsekvent hastighet och djup, vilket är omöjligt att uppnå med manuella kompressioner
- ❖ Möjlighet till 30:2 kompressions-ventilationscykel

Enkel

- ❖ Tack vare reglage och spännssystem, kan den lätt fästas på överkroppen
- ❖ Lätt att placera – lätt att använda

Ytterligare egenskaper

- ❖ Utbytbar batteri med indikator om laddningsnivå
- ❖ Autonom användning i 45 minuter (med ett batteri)
- ❖ Anslutningar: extern DC ingång, USB



CoreMed Scandinavia AB
Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal
Tel 031-521140
Fax 031-521156
E-mail: info@coremed.se
Hemsida: www.coremed.se